
【形状・構造等及び原理等】

形状 ベースト状
成分 研磨材 脂肪酸 水
色調 白色（傷取り仕上げ研磨用粒子）
粒子 細目TYPE

【使用目的又は効果】

歯科用研磨器材補綴物等の研磨に用いる器材であり、
本品は主に義歯に使用されるレジン系及び金属の仕上げ研磨で
ある

【使用方法等】

1. 研磨を終えた樹脂補綴物の傷具合を確認する。
2. 傷の有る部分に本品を少量塗布する
3. ハンドピースを用いて軽く掃くように研磨する
4. 超音波洗浄後水洗いをし本品を完全に洗い落とす

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

研磨後は十分に洗浄を行い本品を完全に洗い落とすこと

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるた
めに、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用する
こと

本製品は【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使
用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意

本品使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の
過敏症が現れた患者又は術者は、使用を中止し、医師の診察
を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

キャップを締め立てた状態で保存する。
歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社美須化学研究所
製造業者	同上
住所	〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目2番11号
電話番号	06-6761-4092(代)