

【形状・構造等及び原理等】

形状 ベースト状
成分 研磨材 脂肪酸 水
色調 白色（傷取り仕上げ研磨用粒子）
粒子 粗目TYPE

【使用目的又は効果】

歯科用研磨器材補綴物等の研磨に用いる器材をいう。
本品は主に義歯に使用されるレジン系及び金属の仕上げ研磨である。

【使用方法等】

- 1. 研磨を終えた樹脂補鉄物の傷具合を確認する。
- 2. 傷の有る部分に本品を少量塗布する
- 3. ハンドピースを用いて軽く掃くように研磨する
- 4. 超音波洗浄後水洗いをし本品を完全に洗い落とす

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

研磨後は十分に洗浄を行い本品を完全に洗い落とすこと

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

本製品は【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意

本品使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた患者又は術者は、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

キャップを締め立てた状態で保存する。
歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社美須化学研究所
製造業者	同上
住所	〒542-0012 大阪市中央区谷町 6 丁目 2 番 1 1 号
電話番号	06-6761-4092(代)