


歯科材料 9 歯科用研磨材
一般医療機器
JDMA70907000 歯科用研磨器材
ニューコットンバフL

【形状・構造等及び原理等】

材質 コットン生地
形状 円盤状

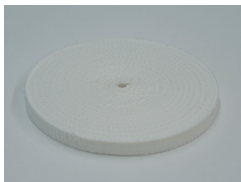

サイズ 直径約125mm

【使用目的又は効果】

本品は主に補綴物等の研磨に使用されるバフである

【使用方法等】

1. 本品をレーズのタケノコに取り付ける
2. 本品を初めて使用する場合はバフの表面をヤスリ等堅い鋭利な物を用いて回転させながらよく解す
2. 研磨材を本品に少量付ける
3. 研磨対象物に軽く掃くように当てて研磨する

回転速度は低速で行う

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

研磨時はレーズの回転部分に十分気を付けること

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること
目への飛散防止のためゴーグル等を着用すること

本製品は【性能、使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意

本品使用により異常が有った場合は使用を中止すること

【保管方法及び有効期間等】

湿気をさけて室温で保管すること
歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社美須化学研究所
製造業者	同上
住所	〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目2番11号
電話番号	06-6761-4092(代)