

歯科材料 9 歯科用研磨材
一般医療機器
JDMA70907000 歯科用研磨器材
フュージョンフェルトホイール

【形状・構造及び原理等】

材質 フェルト
形状 円筒状



サイズ 直径約25mm±1mm×厚約12mm±2mm
中心穴径1.5mm±0.5mm

【使用目的又は効果】

本品は主に補綴物等の研磨に使用されるハンドピース用フェルト製ホイールである

【使用方法等】

1. 本品を市販のマンドレルに取り付ける
2. 1で準備したマンドレル付本品を技工用ハンドピースに装着する
2. 研磨材を本品に少量付ける
3. 研磨対象物に軽く掃くように当てて研磨する

回転速度は低速で行う

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

研磨時はレーズの回転部分に十分気を付けること

本品がマンドレルに確実に取り付けてあるか確認すること

本品とマンドレルがハンドピースに取り付けてある際、ぐらつきや異常がないかを確認する

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

目への飛散防止のためゴーグル等を着用すること

本製品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

本品使用により異常が有った場合は使用を中止すること

【保管方法及び有効期限等】

湿気や腐食性薬品をさけて室温で保管すること
歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社美須化学研究所
製造業者 同上*
住所 〒542-0012
大阪市中央区谷町6丁目2番11号
電話番号 06-6761-4092(代)