



機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 外科用テープ 70419000

メディループ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

形状

メディループ(シリコン製)



断面拡大図



- 本品は使用部位の違いにより色が異なる。以下に適用部位を示す。

カラーコード	適用
青	静脈用
赤	動脈用
白	神経用
黄	尿管用

原理

本品は外科的に血管、神経、尿管等を一時的に保持するものである。

【使用目的又は効果】

各種器官を一時的に保持するために用いる帯状・管状の糸及び紐をいう。

【使用方法等】

1. 外科的に血管、神経、尿管等を一時的に保持する。

【使用上の注意】

不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下のような不具合・有害事象が発生する場合がある。

1. 不具合
 - 破損
2. 有害事象
 - 血管、神経、尿管の損傷
 - 壊死

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 水濡れに注意し、日光・蛍光灯・紫外線殺菌装置等の光、高温及び多湿を避けて室温で保管すること。

有効期間

- 被包に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社メディコスヒラタ
連絡先 TEL : 06-6443-2288

* 外国製造業者 : Neuromedex GmbH (ドイツ)