

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（コード：70907000）

セラージュ

【形状・構造及び原理等】

ダイヤモンド粒子を含有した灰白色の研磨ペースト

【使用目的又は効果】

陶材またはジルコニア製補綴物の研磨に用いる

【使用方法等】

- 1) 歯科用レーズやマイクロモーターに、使用するバフ・ブラシ・フェルトホイール等を装着する。
- 2) バフ・ブラシ・フェルトホイール等を回転させ、本製品を付着させる。
- 3) 陶材またはジルコニア製の補綴物の表面に適度な力を加えて接触させ、研磨する。
- 4) 研磨後は付着物をスチームクリーナー又は超音波洗浄機などで洗い流す。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 研磨作業の際には粉塵が発生する。粉塵による人体への影響を避けるため、防塵マスク、手袋等の適切な防塵設備の使用と集塵装置の設置をすること。
- 2) 目の損傷を防ぐため、保護メガネを着用すること。

【使用上の注意】

- 1) 本製品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 2) 本製品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 3) 本製品を使用し、研磨した粉塵が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温、多湿、直射日光、火気等を避けたうえ、室温で保管すること。
- 2) 本製品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ビーディーアール
愛知県名古屋市中白区原4-106