

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ（コード：35768000）

ポリッシングブラシ CA

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・構造
ナイロン製のブラシに黄銅製の軸を付与した研磨材

2) 使用回転数
最大3,000回転/分

3) 種類

形状	毛の硬さ	色
カップ型	ソフト	ピンク
		パープル
	レギュラー	ブルー
スクエア型	レギュラー	イエロー
コーン型	レギュラー	ホワイト

- 2) アルカリ性洗浄剤は使用しないこと。金属に銅を含有しており、変色の原因となるため。
- 3) 本品は滅菌できないので、滅菌器を使用しないこと。
- 4) 本品を洗浄・消毒する場合には手袋等を着用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
株式会社 ビーディーアール

外国製造業者
Wuhan Jinguang Electronic Appliance Co., Ltd.
(中華人民共和国)

【使用目的又は効果】

歯牙や補綴物の研磨に用いるブラシ

【使用方法等】

- 1) 歯科用ハンドピース（コントラアングル）に装着する。
- 2) 回転させて、振れがないかを確認する。
- 3) 研磨ペーストをブラシに塗布する。
- 4) ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ハンドピース（コントラアングル）メーカーの指定に従ってシャंकを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) ハンドピース挿入に専用の治具が必要な機器は、必ず治具を使用すること。ネックが曲がる場合があるので、無理な圧力をかけてはめこまないこと。
- 3) 予め回転させて、振れがないことを確認すること。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
- ① 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- ② 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり）、汚染等のあるものは使用しないこと。
- ③ 本品の加熱や改造は行わないこと。
- ④ 目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。もし本品または切削屑が目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ⑤ 本器具は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥ 本器具は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 洗浄剤、消毒剤については、各製造業者の指示に従い、正しく使用すること。塩素系消毒剤は、使用しないこと。