

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用技工用アブレイブ研削器具（コード：70901000）

コスパ ガラスビーズ研磨材

【形状・構造および原理等】

ソーダ石灰ガラスで作られた球形粒状の研削材。サンドブラスト機を用いて、適量を噴射することにより、技工物の研削作業を行う。

【使用目的又は効果】

歯科技工物制作過程において、サンドブラスト材料として技工物の表面処理や酸化被膜・石膏・埋没材の除去などに用いる。

【使用方法等】

サンドブラスト機に投入して研削作業を行う。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- サンドブラスト機の操作手順に従って正しく使用すること。
- サンドブラスト機によって使用可能なブラスト材料の粒径が異なるため、事前に必ず使用のサンドブラスト機が本品に適合しているかどうかを確認すること。
- 循環式サンドブラスト機で使用する場合は、連続使用により本品自体が粉砕して本来の処理能力が次第に得られなくなるため、過度の連続使用は行わないこと。

【使用上の注意】

- 作業中は粉塵による人体への影響をさけるため、保護手袋、防塵マスク、保護メガネ、局所集塵装置を使用すること。
- サンドブラスト機のノズル部が目詰まりを起こす可能性があるため、塊が発生した本品を直接使用しないこと。
- 本品が床などにこぼれた場合は滑りやすいので注意すること。
- 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

湿気により固まる場合があるので、容器を密封し乾燥した屋内に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106