

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（コード：70907000）

コスパ レーズ用ブラシ 豚毛

【形状・構造および原理等】

円盤状の土台部にブラシが植毛されている作業部を持つ、ホイール状のブラシ。
歯科技工用レーズに装着し、豚毛製の作業部により研磨する。

【使用目的又は効果】

歯科技工用レーズに装着し、歯科補綴物などの研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用レーズに装着し回転させ、断続的に被研磨物に軽く押し付けて研磨する。
適宜、ブラシ部に研磨材を適量塗布して使用する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 歯科技工用レーズのメーカーに指示に従って本品を装着し、確実に固定されていることを確認すること。
- 予め回転させて、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- 最高使用回転数（3,600RPM）を超えて使用しないこと。
- 変形、割れ、欠け、傷等のあるものは使用しないこと。
- 本品の形態変更や改造などは行わないこと。
- 作業中は、保護用手袋、防塵マスク、フェイスガード、保護用メガネ、局所吸塵装置を使用するなど、防塵の対策を行うこと。
- 本器具は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

火気のないところで、換気の良い直射日光を避けた場所にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後に変形、割れ、欠け、傷等がないかを確認し、これらがある時は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市天白区原4-106