

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（コード：70907000）

ナイロンホイール

【形状・構造および原理等】

研磨剤を付着させたナイロン繊維製のホイール。
マンドレルに装着し、歯科技工用ハンドピース等に接
続し、被研磨物を研磨する。

【使用目的又は効果】

歯科技工物製作過程において、歯科用金属、ポーセレン
およびレジン、ポリカーボネイト樹脂等の表面研磨
に用いる。

【使用方法等】

- マンドレルにホイールをしっかり固定させる。
- 歯科技工用ハンドピース等に装着する。
- 回転させて、振れがないかを確認する。
- 任意の回転数で回転させた本品を被研磨物に接
触させて研磨する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンク
を確実に奥まで挿入して、半チャックでないこ
とを確認すること。
- 使用前に十分に予備回転を行い、振れがないこ
とを確認すること。

【使用上の注意】

- 最高使用回転数（15,000RPM）を超えて使用しな
いこと。
- マンドレルは、フランジの外径が本品外径の1/3
以上のものを使用すること。
- 作業中は、保護用手袋、防塵マスク、保護メガ
ネ、局所吸塵装置を使用するなど、防塵の対策
を行うこと。
- 本器具は【使用目的又は効果】の項に記載の用
途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後に破損、キズ等がないかを確認し、こ
れらがある時は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市天白区原4-106