

歯09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材（コード：70907000）

## マイスター フェルトコーン

### 【形状・構造および原理等】

羊毛製の砲弾型フェルト。  
歯科技工用レーズエンジンに装着し、フェルト製の作業部により研磨を行う。

### 【使用目的又は効果】

歯科技工用レーズエンジンに装着し、歯科補綴物などの研磨に用いる。

### 【使用方法等】

歯科技工用レーズエンジンに装着し、回転させ、ソフトタッチで断続的に被研磨物に軽く押し付けて研磨する。  
適宜、研磨材を適量塗布して使用する。

#### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 歯科技工用レーズエンジンメーカーの指示に従って本品を装着し、確実に固定されていることを確認すること。
- 予め回転させて、振れがないことを確認すること。

### 【使用上の注意】

- 指定の回転数を超過して使用しないこと。
- 変形、汚れ、傷等のあるものは使用しないこと。
- 本品の形態変更や改造などを行わないこと。
- 作業中は、防塵マスク、フェイスガード、保護メガネ、局所吸塵装置を使用するなど、防塵の対策を行うこと。
- 本器具は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

高温多湿、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後に変形、汚れ、傷等がないかを確認し、これらがある時は使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社 ピーディーアール  
愛知県名古屋市中白区原4-106