

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具(コード:70744000)
セレーノ HP用カーバイドカッター

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・構造および原理

歯科技工用ハンドピースを接続できる軸に、タングステンカーバイド製の作業部を持つ。

歯科技工用ハンドピース等に接続し、本品を回転させることで被研削物を切削する。

*2) 各形態の使用回転数

●上限20,000回転/分	
型番	401/403/404/405/406/407/408/409/410/ 411/601/602/603/604/001/003/004/005/ 006/007/101/102/103/206
●上限25,000回転/分	
型番	002/207/402/805/904/905/906/907/914/ 915/916/917/918/919/921/922/923
●上限30,000回転/分	
型番	101/102/103/104/105/107/110/112/113/ 115/118/119/120/123/130/201/204/213/ 218/219/222/224/226/227/230/235/236/ 314/315/316/317/320/332/338/339/343/ 344/346/349/350/353/356/359/360/701/ 705/707/708/801/802/803/804/806/807/ 808/901/902/903/911/912/913/920
●上限35,000回転/分	
型番	106/108/109/114/117/121/122/124/125/ 126/127/128/129/131/209/210/212/217/ 221/223/237/329/307/308/310/312/313/ 328/331/337/342/345/348/358/706
●上限40,000回転/分	
型番	211/201/202/203/205/206/207/208/214/ 216/228/229/233/234/301/302/303/305/ 306/304/318/319/321/322/326/327/330/ 333/334/335/336/341/352/354/355/357

【使用目的又は効果】

貴金属、非貴金属、レジン、石こうを研削するために用いる。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ハンドピース等のメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

- 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。頭部が細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがある。

【使用上の注意】

- 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり)、汚染等のあるものは使用しないこと。
- 本品の加熱や改造などは行わないこと。
- 本品を使用する際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- 本品を使用する際は、目の損傷を防ぐために、保護メガネを使用すること。もし切削屑や破片などが目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 本器具は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後には損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり)、汚染等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106