

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ(コード: 16184000)
ハイジス プロフィーカップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状: CAタイプ、スクリュータイプ

構造: カップ部(熱可塑性エラストマー)と軸部(銅にニッケルメッキ)からなる。

原理: 本品カップ部は柔軟で内面にデザインパターンを有し、軸部をハンドピースに装着し、回転させることによって歯面部などの清掃・研磨を行う。

【使用目的又は効果】

歯科予防(清掃)時に研磨材を適用するために用いる、ゴム製の器具で、歯科用ハンドピースに取り付け回転させて研磨材を歯に適用する。

【使用方法等】

- 清掃もしくは研磨する部位に適した形状のカップを選択する。
- カップに研磨用ペーストをつける。
- ハンドピースを回転させて、歯面を清掃・研磨する。
※回転数は5,000ppm以下で使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさせるおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- CAタイプ、もしくはスクリュータイプをマンドレルを用いて使用する場合は、ハンドピースメーカーの指示に従って、軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- スクリュータイプをハンドピースに取り付けて使用する場合は、確実に奥までスクリューを締め、動かないことを確認すること。
- あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- 使用時に、無理な力を加えないこと。無理な力を加

えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つけるおそれがある。

- スクリュータイプを使用する場合は、モーターを逆(左)回転させると外れてしまうので、使用に際しては、必ず正(右)回転で使い、逆(左)回転はしないこと。

【使用上の注意】

- 使用注意(次の患者には慎重に適用すること) 本品、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 損傷、変形(錆、表面傷、曲がり)、汚染等のあるものは使用しないこと。
- 目の損傷、飛沫感染を防止するため、保護メガネ、マスクを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- もらい錆を防ぐため、錆びた機器と一緒に保管しないこと。
- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106