

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ(コード: 16184000)
リズブル プロフィーカップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】*

形状: CAタイプ、スクリュータイプ

構造: 作業部(シリコン※一部はナイロン製のブラシ付
き)と軸部(銅にニッケルメッキ)からなる。

原理: 軸部をハンドピースに装着し、回転させること
によって歯面部などの清掃・研磨を行う。

【使用目的又は効果】

歯科予防(清掃)時に研磨材を適用するために用いる、ゴム製
の器具で、歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材
を歯に適用する。

【使用方法等】

- 1) 清掃もしくは研磨する部位に適した形状のカップを選択
する。
- 2) 歯科用ハンドピースに装着する。
- 3) カップに研磨用ペーストをつける。
- 4) ハンドピースを回転させて、歯面を清掃・研磨する。
※回転数は5,000～7,000rpmで使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさせるおそ
れがあるので、使用回転数を厳守すること。
- 2) CAタイプ、もしくはスクリュータイプをマンドレルを用いて
使用する場合は、ハンドピースメーカーの指示に従って、
軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認
すること。
- 3) スクリュータイプをハンドピースに取り付けて使用する場
合は、確実に奥までスクリューを締め、動かないことを確

認すること。

- 4) あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないこと
を確認すること。
- 5) 使用時に、無理な力を加えないこと。無理な力を加えると
負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つけるおそれがあ
る。
- 6) スクリュータイプを使用する場合は、モーターを逆(左)回
転させると外れてしまうので、使用に際しては、必ず正
(右)回転で使用し、逆(左)回転はしないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
本品、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮
膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しない
こと。
- 2) 損傷、変形(錆、表面傷、曲がり)、汚染等のあるものは
使用しないこと。
- 3) 目の損傷、飛沫感染を防止するため、保護メガネ、マス
クを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) もらい錆を防ぐため、錆びた機器と一緒に保管しないこ
と。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧(物理的
負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市天白区原4-106