

機械器具 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用根管プラグ（JMDNコード：41876000）

## SANI プラガー

### 【禁忌・禁止】

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

### 【形状・構造および原理等】

#### 1)形状

円柱状又は先細の作業部分をもち、横断面が円形で先端が平坦な歯科用器具



#### 2)材質

ハンドル部：アルミニウム

作業部：ニッケルチタン合金／ステンレススチール

### 【使用目的又は効果】

根管に充填物を主に軸方向に充填することを目的としている。

### 【使用方法等】

- 1) 使用に先立って必ず洗浄・滅菌を行う。
- 2) 根管の太さに合わせた適切なサイズの本品先端部を充填物に当て、垂直圧力をかけて充填する。

### 【使用上の注意】

- 1) 本品の使用中に感作またはアレルギー反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 破損の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻等の二次加工や加熱を行わないこと。

- 3) もらい錆を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- 4) 製品に変形などの異常がある場合には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避けて、埃のない清潔な場所に保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後に破損、キズ等がないかを確認し、これらがある時は使用しないこと。
- 2) 使用後は、できるだけ早く精製水、防錆洗浄剤を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去し、洗浄・消毒すること。
- 3) 錆びの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシは使用しないこと。
- 4) 薬剤消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。特に、長時間の浸漬は避けること。
- 5) 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する事がある。
- 6) 滅菌時はオートクレーブ滅菌器を使用する。  
134℃以下（乾燥工程も含む）を厳守すること。  
高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市天白区原4-106