

歯09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ（コード：35768000）

## プロフィールブラシ2122

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

形状：CAタイプ、スクリュータイプ

構造：ブラシ部（ナイロン）と軸部（真鍮）からなる。

原理：本品はブラシを備えた回転式歯科用器具で、歯面の清掃・研磨を行うことができる。

### 【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- 清掃もしくは研磨する部位に適した形状のブラシを選択する。
- ブラシに研磨用ペーストをつける。
- ハンドピースを回転させて、歯面を清掃・研磨する。

※回転数は800～2,000rpmで使用する。

### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 使用前に適切な洗浄を行うこと。
- 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさせるおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- CAタイプ、もしくは専用マンドレルを用いてスクリュータイプを使用する場合は、ハンドピースメーカーの指示に従って、軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- スクリュータイプをハンドピースに取り付けて使用する場合は、確実に奥までスクリューを締め、動かないことを確認すること。
- あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。

- 使用時に、無理な力を加えないこと。無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つけるおそれがある。
- スクリュータイプを使用する場合は、モーターを逆（左）回転させると外れてしまうので、使用に際しては、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。

### 【使用上の注意】

- 損傷、変形（錆、表面傷、曲がり）、汚染等のあるものは使用しないこと。
- 目の損傷、飛沫感染を防止するため、保護メガネ、マスクを使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- もらい錆を防ぐため、錆びた機器と一緒に保管しないこと。
- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中区原4-106