

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材(コード:70907000)

ルーチェ HP用 ロビンソンブラシ

【形状・構造及び原理等】

形状: HPタイプ

構造: 作業部(羊毛または羊毛と馬毛の混合毛)と軸部(鉄)からなる。

原理: 歯科用電気駆動装置に取り付け、回転を与えることにより、作業部も回転し、補綴物を研磨することができる。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 本品を歯科用電気駆動装置に装着する。
 - 回転させて断続的に被研磨物に押し当てて補綴物を研磨する。
- ※使用回転数: 10,000～15,000rpm

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをしておそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認して使用すること。
- 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合は直ちに作業を停止すること。

【使用上の注意】

- 損傷、変形(錆、表面傷、曲がり)、汚染等のあるものは使用しないこと。
- 目の損傷、粉塵吸入を防止するため、保護メガネ、防塵マスクを使用すること。
- 排気装置の備わった環境で作業すること。

【保管方法及び有効期間等】

- もらい錆を防ぐため、錆びた機器と一緒に保管しないこと。

いこと。

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106