

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材(コード:70907000)

ルーチェ フェルトホイール

【形状・構造及び原理等】

形状・構造: 羊毛フェルト製ホイール
原理: マンドレルを用いて歯科用電気駆動装置ハンド
ピースに装着し、回転させて使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市長区原4-106

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 本品をマンドレルを用いて歯科用電気駆動装置に装着する。
- 回転を与えて補綴物を研磨する。
※使用回転数: 6,000~10,000rpm

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 使用回転数を超えての使用は、破損やけがを
おそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、マ
ンドレルを確実に奥まで装着したことを確認して使用
すること。
- 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認す
ること。
- 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するよ
うな場合は直ちに作業を停止すること。

【使用上の注意】

- 損傷、汚染等のあるものは使用しないこと。
- 目の損傷、粉塵吸入を防止するため、保護メガネ、
防塵マスクを使用すること。
- 排気装置の備わった環境で作業すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧(物理的
負荷)及び汚染を受けないように保管すること。