

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ（コード：35768000）

ハイグレードプロフィーブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：CAタイプ

構造：ブラシ部（ナイロン、山羊毛）と軸部（銅に
ニッケルメッキ）からなる。

原理：本品はブラシを備えた回転式歯科用器具で、
歯面の清掃・研磨を行うことができる。

【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清
掃と研磨に用いる。

【使用方法等】

- 清掃もしくは研磨する部位に適した形状のブラ
シを選択する。
- ブラシに研磨用ペーストをつける。
- ハンドピースを回転させて、歯面を清掃・研磨
する。

※回転数は10000-12000rpmで使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさ
せるおそれがあるので、使用回転数を厳守する
こと。
- 使用する場合は、ハンドピースメーカーの指示
に従って、軸部を奥まで挿入し、確実にロック
されていることを確認すること。
- あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れが
ないことを確認すること。
- 使用時に、無理な力を加えないこと。無理な力
を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷
つけるおそれがある。

【使用上の注意】

- 損傷、変形（錆、表面傷、曲がり）、汚染等のある
ものは使用しないこと。
- 目の損傷、飛沫感染を防止するため、保護メガ
ネ、マスクを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- もらい錆を防ぐため、錆びた機器と一緒に保管
しないこと。
- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧（物
理的負荷）及び汚染を受けないように保管するこ
と。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中天白区原4-106