

歯09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ（コード：35768000）

## ハイグレードプロフィーブラシ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

形状：CAタイプ

構造：ブラシ部（ナイロン、山羊毛）と軸部（銅に  
ニッケルメッキ）からなる。

原理：本品はブラシを備えた回転式歯科用器具で、  
歯面の清掃・研磨を行うことができる。

### 【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清  
掃と研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- 清掃もしくは研磨する部位に適した形状のブラ  
シを選択する。
- ブラシに研磨用ペーストをつける。
- ハンドピースを回転させて、歯面を清掃・研磨  
する。

※回転数は10000-12000rpmで使用すること。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 使用前に適切な洗浄を行うこと。
- 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさ  
せるおそれがあるので、使用回転数を厳守する  
こと。
- 使用する場合は、ハンドピースメーカーの指示  
に従って、軸部を奥まで挿入し、確実にロック  
されていることを確認すること。
- あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れが  
ないことを確認すること。
- 使用時に、無理な力を加えないこと。無理な力  
を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷  
つけるおそれがある。

### 【使用上の注意】

- 損傷、変形（錆、表面傷、曲がり）、汚染等のある  
ものは使用しないこと。
- 目の損傷、飛沫感染を防止するため、保護メガ  
ネ、マスクを使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- もらい錆を防ぐため、錆びた機器と一緒に保管  
しないこと。
- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧（物  
理的負荷）及び汚染を受けないように保管するこ  
と。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市長区原4-106