


機械器具67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダムフレーム（コード：31849000）

ラバーダムフレーム

【形状・構造および原理等】

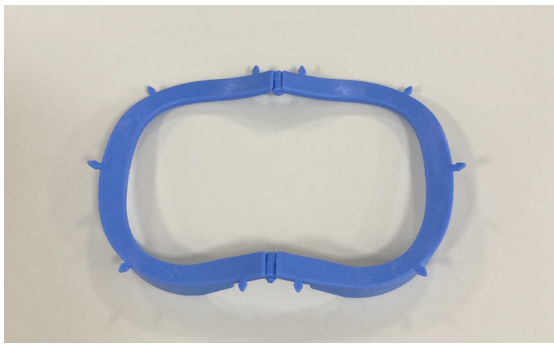

材質：ポリアミド

【使用目的又は効果】

ラバーダムを延伸した状態で保持するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用前に必ず滅菌済かを確認すること。
- 2) 本品の突起部にラバーダムシートを引っ掛け、フレーム内にダムを形成する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む134℃以下厳守。）
- 2) 破損の原因となる、器具に対しての形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行わないこと。
- 3) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、高温多湿を避け、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、変形、変色等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 使用後は、できるだけ早く精製水、洗浄剤を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去し、洗浄・消毒すること。
- 3) 傷などの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシは使用しないこと。
- 4) 洗剤の残留がないよう充分にすすぎをし、乾燥させること。
- 5) 薬剤消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがある。特に、長時間の浸漬は避けること。
- 6) オートクレーブ滅菌器を使用する際は、134℃以下を厳守し、乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。
- 7) 充分乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ピーディーアール
愛知県名古屋市天白区原4-106