

器66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成へら（コード：38530000）

リズブル スパチュラ

【形状・構造および原理等】

1. 形状・構造

木製またはプラスチック製のハンドルの先端にへらがついている。

2. 原材料

スパチュラ木柄

ハンドル部：木材

作業部：ステンレススチール

ミキシングスパチュラ

ハンドル部：プラスチック

作業部：ステンレススチール

【使用目的又は効果】

印象材や石こうの練和に用いる。

【使用方法等】

印象材や石こうを練和する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必要なに応じて消毒等を行うこと。
- 2) 破損、摩耗、腐食、変形、その他劣化や損傷のあるものは使用しないこと。
- 3) 破損等の原因となるので、以下は行わないこと。
 1. 粗雑な取り扱いを行うこと。
 2. 使用時に必要以上の力（応力）を加えること。
 3. 改造、調整等の二次加工。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) ほこり及び水気のない場所で、腐食性薬剤及びその蒸気、汚染、直射日光を避けて保管すること。
- 2) 外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) “もらいさび”を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、変形、変色、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 錆びや傷の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシは使用しないこと。
- 3) 洗浄には器具用防錆洗浄剤（中性）を使用し、強酸性または強アルカリ性の洗浄剤は使用しないこと。
- 4) 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぐこと。
- 5) 洗浄にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する事がある。
- 6) 洗浄後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106