

器39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子（コード：70935000）

リズブル 石こう鉗子

【形状・構造および原理等】

1. 形状・構造

ペンチ状で、二本の棒が回転軸で結合されており、片方の先端をハンドル、もう片方を作業部とする。

2. 原材料

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

石膏模型を分割するために用いる。

【使用方法等】

本品で石膏を挟み分割する。

【使用上の注意】

- 破損、摩耗、腐食、変形、その他劣化や損傷のあるものは使用しないこと。
- 破損等の原因となるので、以下は行わないこと。
 - 粗雑な取り扱いをすること。
 - 使用時に必要以上の力（応力）を加えること。
 - 改造、調整等の二次加工。

【保管方法及び有効期間等】

- ほこり及び水気のない場所で、腐食性薬剤及びその蒸気、汚染、直射日光を避けて保管すること。
- 外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- “もらいさび”を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、変形、変色、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

- 錆びや傷の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシは使用しないこと。
- 洗浄には器具用防錆洗浄剤（中性）を使用し、強酸性または強アルカリ性の洗浄剤は使用しないこと。
- 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぐこと。
- 薬剤消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。特に、長時間の浸漬は避けること。
- 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する事がある。
- 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市天白区原4-106