

器36 医療用ピンセット

一般医療機器 ピンセット（コード：35079001）

リズブル ディスポーザブルピンセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【有効期限】

- 製造日より3年（記載の有効期限は製造元のデータによる。）
- 包装材記載の使用期限までに使用すること。

【形状・構造および原理等】

1. 形状・構造

本品は、2つの先細のバネ性先端部をもつ。

2. 原材料

ハンドル部：ABS樹脂

先端部：ステンレスチール

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【使用目的又は効果】

皮膚・組織・異物等をつまみ、または把持する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106

【使用方法等】

片手で把持し、2つの先端部分の間に保持する物体を置き、指に力を加えてはさみ、持ち上げる。

【使用上の注意】

- 劣化や異常が見られる場合は使用しないこと。
- 破損等の原因となるので、以下は行わないこと。
 - 粗雑な取り扱いをすること。
 - 形態変更や改造等を行うこと。
 - 器具をヒートンクすること。
- 本品は滅菌済みのため包装の破損が認められた場合は使用しないこと。
- 本品は滅菌済であるため、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 高温多湿を避け、直射日光のあたらない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。