

2026年7月作成(第1版)

歯07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用パラフィンワックス(コード: 70893000)

クラフトマスター パラフィンワックス セカンドライン

【形状・構造及び原理等】

形状: 板状

色調: 赤色

原理: 常温または加温により軟化させ、加工する。

【使用目的又は効果】

主として義歯床の仮床、人工歯の排列などに用いる。

【使用方法等】

義歯の仮床

- 1) 本品を作業模型の大きさに合わせカットする。
- 2) 本品を適度に軟化し、作業模型に圧延する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

人工歯の排列

- 1) 本品を加熱して軟化し、棒状にする。
- 2) ワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
- 4) 歯科技工の通法に従い、人工歯を排列する。

ロウ堤の作製

- 1) 本品を加熱して軟化し、棒状にする。
- 2) ワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【使用上の注意】

・本材は可燃性のため、使用の際は火気およびやけどに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿と直射日光を避けて保管すること。
- ・火気厳禁の場所に保管し、使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106