

2026年7月作成(第1版)

歯07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス(コード:16189000)
クラフトマスター カービングワックス セカンドライン

【形状・構造及び原理等】

形状:固形(缶入)

色調:ブルー、グリーン、パープル

原理:加温により軟化させ、加工する。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いるワックスである。

【使用方法等】

- 歯科技工用インスツルメントを用いて加熱溶解し、模型上に盛り上げて形態を整える。
- 通法に従い埋没する。

【使用上の注意】

・本材は可燃性のため、使用の際は火気およびやけどに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿と直射日光を避けて保管すること。
- 火気厳禁の場所に保管し、使用及び保管場所には消火器を備えること。
- 一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106