

2026年7月作成(第1版)

歯07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス(コード:16189000)
クラフトマスター ワックスディスク セカンドライン

【形状・構造及び原理等】

形状:円盤状

色調:緑色

原理:歯科用CAD/CAM装置により、切削加工して用いる。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用CAD/CAM装置を用いてロストワックス法にて固定式補綴修復物を製作する際に、ろう型作製用に使用するワックスである。

【使用方法等】

- ミリングマシーンにて本品を切削加工する。
- 通法に従い埋没、鋳造、研磨を行う。

【使用上の注意】

・本材は可燃性のため、使用の際は火気およびやけどに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿と直射日光を避けて保管すること。
- 火気厳禁の場所に保管し、使用及び保管場所には消火器を備えること。
- 一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ピーディーアール

愛知県名古屋市中白区原4-106