

** 2019年9月改訂（第3版）
* 2017年3月改訂（第2版）

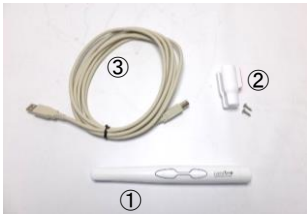
機械機器21 内臓機能検査用器具 70179000
一般医療機器 歯科用口腔内カメラ

カムスター

【禁忌・禁止】

- * 【使用方法】
安全に使用する為に、下記の事項を遵守すること。
1. 白色LEDライトを直視しないで下さい。
[目を損傷する恐れがあるため]
2. 10分以上連続して使用しないで下さい。
[10分以上連続使用すると本体が温かくなり、低温やけどを
起こす可能性があるため]
- * 【併用禁忌】 〈相互作用の項参照〉
1. ペースメーカー及びICD等の植込み医療機器を使用している患者
[誤作動の恐れがあるため]

【形状、構造及び原理等】

1. 品目仕様
性能
・光源 : 2ホワイトLED
・焦点レンジ : 9m~35mm
・写角 : 62°
- ** 2. 外観
- 
3. 構成
①本体
②ホルダー
③USBケーブル
4. 寸法及び重量
・寸法 W : 20mm × D : 21.6mm × H : 193mm
・重量 33g
5. 電氣的定格
・定格電圧 : DC 5V
・定格電流 : 500mA
・消費電力 : 2.22W
6. 動作原理
本体の白色LEDライトにより口腔内を照らし、
CCDカメラで撮影する。
7. 使用環境条件
・周囲温度 : 室温1~30℃
・周囲湿度 : 30%~70%RH(結露・氷結させないこと)
・気圧 : 750hPa~1060hPa

【使用目的又は効果】

口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に
使用する。

【使用方法等】

1. 準備
本体のメインボタン（外観写真本体の右のボタン）を
長押ししてONにする。
本体先端部のLEDライトが点灯し電源が入る。
2. 撮影
先端部のレンズを撮影対象物に近づけ撮影ボタン
（外観写真本体の左のボタン）を押して撮影する。
3. 終了
本体のメインボタン（外観写真本体の右のボタン）を押して
電源をOFFにする。
本体先端部のLEDライトが消灯し電源が切れる。

【使用上の注意】

- ** 1. 重要な基本的注意
①コネクタやジャックに指や物を入れないで下さい。
②本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
③本製品を濡れた手で使用しないで下さい。
④強力な電磁波を発生する電子機器からは、1m以上離してご使用下さい。
⑤高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）は行わないで下さい。
⑥本製品から煙、異臭、異音が出た場合は、すぐに電源を切り、
使用を中止して下さい。
⑦本製品内部に液体や異物が混入した場合は、すぐに電源を切り、
使用を中止して下さい。
⑧鋭利な物で傷つけるなど、本製品を損傷させる行為は行わないで下さい。
⑨清掃・点検の際や長期間使用しない場合は、本製品の電源を切ってください。
⑩本製品に不具合が生じた場合は、本製品の電源を切り、
「故障中」等の表示を行い、当社に連絡して下さい。
⑪清掃の際、シンナー、ベンジンなどの揮発性の有機溶剤、
化学雑巾などは使用しないで下さい。

2. 相互作用

- * 併用禁忌〈併用しないこと〉

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序、危険因子
ペースメーカー、ICD等	使用しないこと	誤作動のおそれがあるため

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件
温度差の激しい場所、結露しやすい場所を避けて保管すること。
2. 耐用期間
5年*(自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項
①日常的に行っていただくこと
汚れたときは、柔らかい乾いた布で拭いて下さい。
汚れが強いときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、
固く絞ってから拭きとって下さい。
シンナー、ベンジン等の揮発性の有機溶剤や化学雑巾等は
使用しないで下さい。

**②定期的（およそ1ヶ月ごと）に行っていただくこと

- 下記の事項について確認して下さい。
不具合がある場合は、当社にご連絡下さい。
・正常に動作するか
・本体のネジ、部品等の緩みやはずれはないか
・本体に割れやひびが入っていないか

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元	ビヤス株式会社
住所	〒132-0035 東京都江戸川区平井6-73-9
電話番号	03-3619-1441
FAX	03-3619-1443
製造元	DENTALL CO., LTD (KOREA) (国名 大韓民国)