

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

キズケアフィルム

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ウレタンフィルム、シリコーン・アクリル粘着剤
セパレーター：紙、シリコーン樹脂

【使用目的又は効果】

創傷面の保護（さかむけ・あかぎれの保護）

【使用方法等】

傷口を消毒後、傷口にあてて貼ってください。

【使用上の注意】

- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・1日2～3回、貼りかえてください。一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。
- ・個包装が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。
- ・品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ビアック株式会社

〒523-0051 滋賀県近江八幡市八木町359

問い合わせ先（TEL）0748-52-5001