

2020 年 8 月 作成（第 1 版）

医療機器届出番号 25B3X10005000002

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

I J テープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止



【形状・構造及び原理等】

(IJ テープ)

粘着フィルム：ナイロン不織布、アクリル系粘着剤
粘着剤付剥離紙：紙、シリコーン樹脂、リピール粘着剤
剥離紙：紙、シリコーン樹脂
パッド：レーヨン不織布

(IJ テープ(リピールなし))

粘着フィルム：ナイロン不織布、アクリル系粘着剤
剥離紙：紙、シリコーン樹脂
パッド：レーヨン不織布

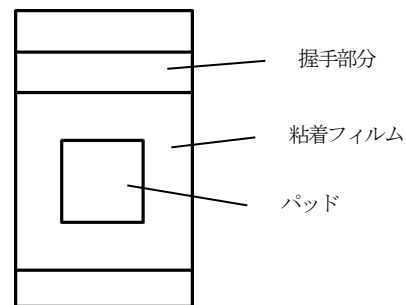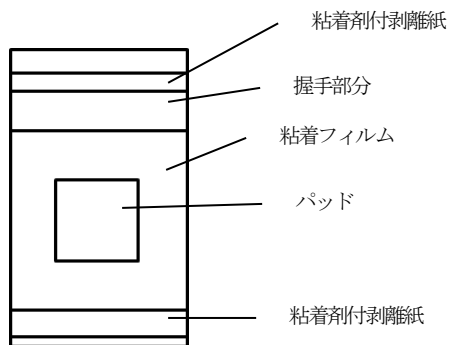

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着フィルムで固定して使用してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼付したり急激にはがしたりしないでください。
- ・発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・一旦はがしたものを再度使用しないでください。
- ・品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ピアック株式会社

〒523-0051 滋賀県近江八幡市八木町 359

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5001