

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

アクセスバン

再使用禁止

**【禁忌・禁止】
再使用禁止**


【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ポリエステル不織布、脂肪酸エステル含有アクリル系粘着剤

剥離紙：紙、シリコーン樹脂

パッド：アルギン酸不織布、PET不織布

〈形状・構造〉

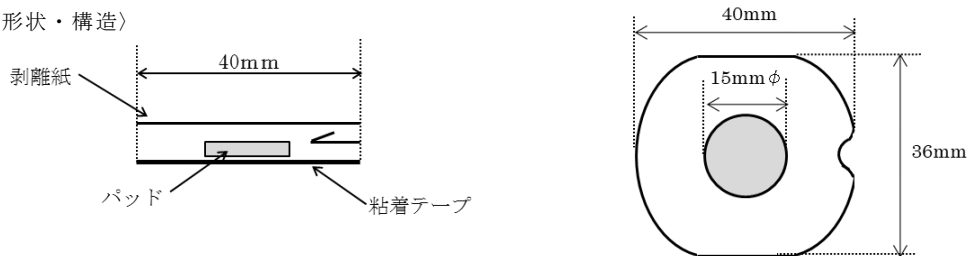

【使用目的又は効果】

注射針・カテーテル等の穿刺部及び創傷面の被覆保護

【使用方法等】

清潔にした貼付部位にパッドを当て、粘着テープにより固定して使用する。

【使用上の注意】

- ・明らかに感染を有している部位には使用しないでください。
- ・貼付部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があると、付きにくい場合があります。特に消毒剤・液剤等はよく乾燥させてから使用してください。
- ・1日1～2回貼る場所を少しずつずらして貼りかえてください。
- ・パッド部分が濡れたり、汚れたりしたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合がありますので貼りかえてください。
- ・使用中、発疹・発赤、かゆみ、痛み等のかぶれの症状があらわれた場合には使用を中止して医師又は薬剤師に相談してください。
- ・救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意してご使用ください。
- ・粘着面を直接患部へ貼らないようにしてください。
- ・皮膚刺激の原因になりますので、テープを引っ張った状態では貼らないでください。
- ・剥がす際は、皮膚を押さえながらゆっくり剥がしてください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。

〈有効期間〉

5年〔自己認証による〕個箱に記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉
ピアック株式会社
TEL 0748-52-5001

〈販売業者〉
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107