

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

アルゴフィット通気

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド : ポリオレフィン、ポリプロピレン、ポリエチレン、レーヨン
粘着テープ : ポリウレタン不織布、シリコーン・アクリル粘着剤
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

患部の汚れ、汗、水気などをふきとり清潔にした後、本品を患部にあてしっかり押さえてお貼りください。最初つきにくく感じる場合がありますが、すぐに皮膚になじんでピッタリフィットします。

【使用上の注意】

- ・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置するとキズの治りが悪くなる場合がありますので貼り替えてください。
- ・本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・1 日 2～3 回、貼り替えてください。一旦剥がしたものを再使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので長時間貼り付けたり急激にはがしたりしないでください。
- ・個包装が破れたり、開封されたりしない限り滅菌効果を保ちます。
- ・品質保持期限を過ぎたものは使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ピアック株式会社

〒523-0051 滋賀県近江八幡市八木町 359

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5001