

アローFITパーツ

再使用禁止

【警告】

＜併用医療機器＞

- ・本品はアローインプラント又は、関連製品と組み合わせて使用するものであり、それぞれの特徴や組み合わせ等を正確に把握した上で、最良の取り扱い方をする必要があります。
[破損や不適切な設置による術後成績不良が発生する恐れがあるため。]

＜使用方法＞

- ・本品を加工して使用する場合は、機能的に問題がない事を確認した上で使用すること。
- ・未使用品において異常な点を発見した場合は、直ちに使用を避け製造販売元へ連絡すること。

【禁忌・禁止】

- ・アローインプラント又は関連品と組み合わせる際、どちらかが正常に機能しない場合は使用を避けること。

＜適用対象（患者）＞

- ・本品で使用されている材質又は、本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

＜併用医療機器＞

- ・他社製品との組み合わせは行わないこと。
[破損や不適切な設置による術後成績不良が発生する恐れがあるため。]

＜使用方法＞**

- ・再使用しないこと。

- ・ステンレス、チタン製品（コーピングなど）はオートクレーブ滅菌を121℃で20分間行い、十分に乾燥させて下さい。

操作方法

- ①本品をインプラントに取り付ける。
- ②印象採得を行い、本品を取り外す。

【使用上の注意】

- ・関連品との組み合わせについても十分理解すること。

重要な基本的注意

- ・金属アレルギーによる異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・高温多湿、直射日光を避け常温で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管すること。
- ・清潔な場所で保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

- ・付着した汚れは速やかにアルコール脱脂綿等で拭きとること。 **
- ・洗浄剤や薬液等には長時間浸さないこと。
- ・汚れを落とす場合は傷が付かないよう注意すること。
- ・水分等が付着している場合は速やかに乾燥させること。

管理

- ・過度の衝撃を加えないよう十分注意して取り扱うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社ブレンベース
電話番号 03-3778-0745

【形状・構造及び原理等】 **

（代表画像）

コーピング（チタン）



レプリカ（ステンレス）



HATなど（アクリル）



【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる
歯科技工用の器具・器材をいう。

【使用方法等】

使用前**

- 口腔内にての使用製品は、滅菌・乾燥の上ご使用下さい。
- ・アクリル、PEEK 製品（パターン、HATなど）はアルコール滅菌を行って下さい。
（使用薬液の取扱説明書をご確認下さい）