

## β パウダー

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
  - ・発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は、使用を中止すること。
- <適用対象（患者）>
- ・本品は発疹、皮膚炎などの過敏症のある患者、並びに呼吸疾患の患者には使用しないこと。

- ・使用者及び患者は保護眼鏡を着用し、パウダーが万一眼に入った場合には、擦らず、ただちに流水で 15 分以上洗い流し、眼科医の診断を受けさせること。
- ・本品を吸入しないように注意を促すこと。
- ・エプロン、タオル等を使用して衣服の汚損を防止すること。
- ・発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診察を受けさせること。
- ・歯肉などの軟組織に噴きつけると、塞栓症を引き起こす恐れがあるので行わないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】



#### 成分：

β-リン酸三カルシウム（β-TCP）で構成される。

#### 形状：

球形顆粒状粉末。

#### 原理：

歯面清掃器の空気圧又は水圧により本品を患者の歯面に噴出して歯面を清掃研磨する。

#### 併用医療機器

- ・各歯面清掃器の添付文書、取扱説明書に従い、使用方法、操作条件を守り慎重に使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 保管方法

- ・高温多湿、直射日光を避け常温で保管すること。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管すること。
- ・清潔な場所で保管すること。

##### 使用期限（自己認証による）

外箱に記載の使用期限までに使用すること。

#### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社ブレンベース  
電話番号 03-3778-0745

#### 【使用目的又は効果】

粉末研磨材であり、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃研磨に用いる。

#### 【使用方法等】

歯面清掃器のパウダージャーに、本品を充填し、歯面清掃器の空気圧又は水圧で本品を噴出させて歯面を清掃研磨する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・一度開封し、パウダージャーに入れたものは再使用せず、残ったものは廃棄すること。
- ・本品は乾燥したものを使用すること。
- ・併用する歯面清掃器の添付文書、操作方法を参照し、その内容に従うこと。

#### 【使用上の注意】

- ・本品は発疹、皮膚炎などの過敏症のある患者、並びに呼吸疾患の患者でないことを必ず確認してから使用すること。