

器械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 歯科用開創器(JMDNコード:13380000)

I. G. P. フラップホルダー

【警告】

- ・感染を防ぐために必ず清潔なものを使用すること。

【禁忌・禁止】

- ・使用目的、用途、用法以外に使用しないこと。
- <適用対象(患者)>
- ・本品で使用されている材質又は、本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



材質

- ・ステンレス

【使用目的又は効果】

- ・手術時に可視性及び到達性を向上させるため、軟組織を移動し、保護するために用いる。

【使用方法等】

操作方法

- ・本製品は未滅菌であるので、オートクレーブによる滅菌をしてから使用します。
- ・使用部位に応じて適切な形状を選択します。
- ・把持部をピンセット等でつかみ、軟組織を移動しながら保持し、視野を確保します。

【使用上の注意】

- ・本品は使用前に十分操作方法に精通すること。

重要な基本的注意

- ・金属アレルギーによる異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管すること。
- ・清潔な場所で保管すること。
- ・血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

- ・付着した汚れは、滅菌生理食塩水を含ませた脱脂綿等で拭き取ること。
- ・洗剤や薬液等には長時間浸さないこと。
- ・汚れを落とす場合は傷が付かないよう注意すること。

- ・水分等が付着している場合は速やかに乾燥させること。

管理

- ・過度の衝撃を加えないよう十分注意して取り扱うこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社ブレンベース
電話番号 03-3778-0745