

## I. G. P. ピンセット

### 【警告】

- ・感染を防ぐために必ず清潔なものを使用すること。

### 【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

- ・本品で使用されている材質又は、本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】



#### \*\*材質

- ・ステンレス

### 【使用目的又は効果】

- ・保持する物体を閉じて挟む2枚の刃をもつ手術器具をいう。ハンドルは永久的に結合している。

### 【使用方法等】

#### 操作方法

- 1) 本製品は未滅菌であるので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行う。オートクレーブによる滅菌の場合は、121℃で20分間行い、十分に乾燥すること。
- 2) 親指と人差し指等を用いて握ると二つの保持面は閉じ、握る力を弱めると開く。

### 【使用上の注意】

- ・使用時には必要以上の力を加えないこと。  
[破損、曲り等の原因になり得るため。]

#### 重要な基本的注意

- ・金属アレルギーによる異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管すること。
- ・清潔な場所で保管すること。
- ・血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

### 【保守・点検に係わる事項】

- ・付着した汚れは、滅菌生理食塩水を含ませた脱脂綿等で拭き取ること。
- ・次の成分を含む薬液（消毒液など）は錆への影響があるため使用を避けること。  
過酢酸製剤（アセサイド6%消毒液など）、塩素系薬品（次亜塩素系ナトリウムなど）、過酸化水素系薬品（オキシドール、強酸性水など）、防錆効果のない四級アンモニウム塩系薬液（塩化ベンザルコニウム、塩

化ベンゼトニウムなど）、防錆効果のない両性界面活性剤系薬液

- ・洗浄剤や薬液等には長時間浸さないこと。
- ・汚れを落とす場合は傷が付かないよう注意すること。
- ・水分等が付着している場合は速やかに乾燥させること。
- ・過度の衝撃を加えないよう十分注意して取り扱うこと。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社ブレンベース  
電話番号 03-3778-0745