

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

ポリッシングペースト Coarse

【禁忌・禁止】

本材又は本材に含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎、腫脹、かゆみ等の過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状	成分
青緑色ペースト状	ケイソウ土、フッ化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ソルビトール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸エステル、着色料、香料、精製水

原理：研磨成分(ケイソウ土)により、歯面を物理的に清掃研磨する。

【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

本材の適量をブラシ又はカップ等に取り、歯面を清掃又は研磨する。処理後、口腔内を洗浄し本材を除去する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) ハンドピースは、高速回転で使用すると研磨材が飛び散ることがあるので、低速回転（1500 rpm 以下）で使用する。
- 2) ハンドピースは、メーカーの指示に従って使用すること。
- 3) 本材を使用して歯面を清掃又は研磨する際には、眼に入るのを防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。
- 4) 本材を使用して歯面を清掃又は研磨する際は、衣服等への飛散を防ぐために患者にエプロン等を使用すること。
- 5) 歯面の汚れがひどい場合は、あらかじめスクレーパーや粗研磨用歯面研磨材等で除去してから使用すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。
- 2) 本材の使用時は、眼の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。
- 3) 本材が眼に入った場合は、すぐに水で十分に洗浄し、眼科医の診療を受けさせるなど適切な処置を行うこと。
- 4) 本材は乾燥すると残渣が落ちにくい場合があるので、使用後は速やかに洗浄すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 高温多湿及び直射日光を避け、室温(1℃～30℃)で保管すること。
- 2) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

＜有効期間＞

外箱に表示

[記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

住所：大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号

TEL：06-6370-4182 FAX：06-6370-4184