

機械器具62 歯科用切削器
一般医療機器 歯科用エキスカバータ JMDN 35811000

エキスカバーター

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、作業部、シャンク部（作業部とハンドル部をつなぐ部位）、及びハンドル部からなる。

**【種類】

作業部とシャンク部の形状により、以下の種類がある。

- ・イングリッシュパターン
- ・イングリッシュパターン ゴールドスタイン
- ・ポピュラータイプ
- ・エンド用
- ・グリック
- ・オーバル
- ・ダービーペリー オーバル
- ・ブレード
- ・マイクロサージャリー用アボラス
- ・呼称なし

また、それぞれの種類には、以下のすべて、あるいはいずれかの形態がある。

規 格	1, 2, 3, 4, 5 6, 14, 17, 18, 19 17W, 18W, 19W, 31L, 31W 32L, 33L 243, 244, 245, 246 36/37, 38/39, 40/41, 44/45 61/62, 63/64, 65/66 125/126, 127/128, 129/130 131/132, 153/154, 220/221 E1, E2, E3
	角柄（2番ハンドル） 丸柄（41番ハンドル） 丸柄（ブラックライン） サテンスチール（6番ハンドル） サテンスチールカラー（7番ハンドル） レジンエイト（8番ハンドル） エバーエッジ（9番ハンドル）

【使用目的、又は効果】

齶蝕部の除去に用いる。

【使用方法等】

把持部を手に持ち先端部の切刃で、齶蝕象牙質を切断及び除去する。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- (3) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (4) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (5) 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- (6) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ホスピトヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸カルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・177℃以上に加熱しないでください。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

単品包装： 1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

電話番号： 03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）