

機械器具64 歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDN 31848000

カラービュープローブ

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

*【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、ネジ式のチップ及びハンドルからなる。

*【種類】

本品には、以下の種類がある。

種 類	品 番	(交換チップ)
Sキット11	PCV11KIT6	PCV11PT
Sキット12	PCV12KIT6	PCV12PT
SキットUNC	PCVNCKIT6	PCVUNC12PT
Sキットウィリアムズ	PCVWKIT6	PCVWPT
Sキット 片頭 ゴールドスタイン	PPSGKIT6	PPSG12PT
Sキット 片頭 オックスフォード	PCVOKIT6	PCV012PT
Lキット11	PCV11KIT12	—
Lキット12	PCV12KIT12	—
LキットUNC	PCVNCKIT12	—
ペリオスクリーンSキット10	PPS10KIT6	PPS10PT
ペリオスクリーンSキット12	PPS12KIT6	PPS12PT
ペリオスクリーンLキット10	PPS10KIT12	—
ペリオスクリーンLキット12	PPS12KIT12	—
ペリオスクリーンPキット10	PPSPROM010	—
ペリオスクリーンPキット12	PPSPROM012	—
バイオタイプ スターターキット	PBTPKIT12	PBTPG (グリーン) PBTPB (ブルー) PBTPW (ホワイト)

品番の末尾の数字（6）はハンドルの種類を示す。

ハンドルの種類

サテンスチール（6番）

【使用目的又は効果】

口腔内診査（歯周ポケットの深さ測定）に用いる。

【使用方法等】

作業部を歯肉構（歯周ポケット）に挿入し、目盛を読み取って深さを測定します。

**＜滅菌方法及び滅菌条件＞

器具	滅菌方法	滅菌条件	乾燥時間
包装した インスト ルメント	真空脱気式	温度：132℃又134℃、 暴露時間：4分	30分以上
	蒸気滅菌		
	重力置換式	温度：121℃、 暴露時間：30分	30分以上

上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

**【使用上の注意】

〔使用方法〕

- ① 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- ② 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- ③ 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- ④ 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
 - ① 本製品に対する曲げ、切削、加圧等
 - ② 粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
 - ③ バーナ等による加熱
- ⑤ 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- ⑥ 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- ⑦ 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
- ⑧ 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取り除かれていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

**【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・141℃以上に加熱しないこと。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。

- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

[キット]

ハンドル 1本
チップ 7個

(*バイオタイプスターターキットは、ハンドル2本、チップ12個)

[交換チップ]

・チップ各種 12個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

電話番号：03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)