

持針器

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

*【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、ハンドルをもつ手術器具で、遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状になっており、縫合時に縫合針を保持するように設計されている。ハンドルには、縫合針を保持した状態を維持（固定）するためのラッチがついている。

*【種類】 品番一覧

マッシュアップライヤー スリムチップ	678-330
マッシュアップライヤー パーマシャープ	678-332
マッシュアップライヤー ワイドチップ	678-331
オルセンヘガー	NH5068 NH5072 NHOH
カストロビージョ	NHCV NH5021 NH5020 NH5020R NH5024 NH5024R NH5024RC NHCV18
カストロビージョ コーテリニ	NH5024CORT
カストロビージョ サイモン	NH5024SIM
ギリズ ファイン	NHGILFINE
クライルウッド	NHCW NH5038
スウェーデン パターン	NH5052
ダーフ	NH5032 NHD
ポイントン	NHB
ホルセイ	NH5036 NH5037
マイクロカストロビージョ	NH5021M NHM-5027 NHDCPVN NH5020M NHM-5025R NHM-5026R NHM-5028 NHDPV NHDPVN NHTMBH NHDCPV
マイクロカストロビージョ スイスペリオ	SPNHDPVN
マイクロ バスキュラー	NH5084 NH5082
マッシュ	NHM NH5076
マッシュコーチャー	NH5074 NH5074E
メイヨー・ヘガー	NHMH NH5042 NH5044
HMT シンジョー	NH5050
アルーガ	NH5022
ウェブスター	NHW NH5030
コリアー	NHC
ドバイキー	NH5046
ヘガーバウムガートナー	NHHB NH5034

ミニライダー	NH5092 NH5094
リヒテンベルク	NHLBPSE

【使用目的又は効果】

縫合時に縫合針を保持するのに用いる。

【使用方法等】

作業部で縫合針を保持し、ラッチを固定した状態で使用します。

**＜滅菌方法及び滅菌条件＞

器具	滅菌方法	滅菌条件	乾燥時間
包装した インスツ ルメント	真空脱気式 蒸気滅菌	温度：132℃又134℃、 暴露時間：4分	30分以上
	重力置換式 蒸気滅菌	温度：121℃、 暴露時間：30分	30分以上

上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

**【使用上の注意】

〔使用方法〕

- ① 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- ② 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- ③ 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- ④ 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
① 本製品に対する曲げ、切削、加圧等
② 粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
③ バーナ等による加熱
- ⑤ 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- ⑥ 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- ⑦ 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
- ⑧ 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取り除かれていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

**【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。

- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・141℃以上に加熱しないこと。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

単品包装：1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

電話番号：03-4550-0660

**＜外国製造業者＞

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）

HU-FRIEDY MFG. CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG
DEUTSCHLAND（ドイツ）