

機械器具50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 歯科用開創器 JMDN 13380000

リトラクター

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、作業部、及びハンドル部からなる。

〔種類〕

本品には、以下の種類がある。

品番一覧

名称	品番／種類
アラム	SRTA01（口蓋側用）
	SRTA02（下顎左用）
	SRTA03（下顎右用）
	SRTA04（ユニバーサル）
	SRTA05（ユニバーサル）
	SRTA06（上顎右用）
	SRTA07（上顎左用）
	TRMGRIFF（ハンドル）

【使用目的又は効果】

可視性及び到達性向上のため、歯茎部の軟組織を移動し、保護するのに用いる。

【使用方法等】

ハンドル部を手に持ち、作業部で歯茎部の軟組織を移動、又は保護します。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 破折の原因となる過度の加圧での使用は避けること。
- 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルミン・フェール、グルコン酸コルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- 薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- 「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。（使用上の注意参照）
- 洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- 滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- 点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- 177℃以上に加熱しないでください。
- フェノールは使用しないこと。
- 必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- 滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- 樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- 消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

単品包装： 1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

電話番号： 03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）