

器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード 31776000

パルメロミラー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〔適用対象（患者）〕

本品はクロムを含有するため、クロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号 03-4550-0660

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔材質〕

作業部（ミラー）：クロム膜ガラス

ハンドル部：プラスチック

外国製造業者：Palmero Healthcare LLC
（国名：アメリカ合衆国）

〔梱包〕

1 箱 24 本（個別包装）

【使用目的または効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用方法等】

口腔内に入れ、診査又は圧排する。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をすること。
- ・破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷（特に鏡面部）等が確認された場合は使用しないこと。
- ・高圧蒸気滅菌は行わないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱うこと。
- ・【使用目的または効果】の項に記載の用途以外の使用はしないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。