

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000

アイ・3Dレジンジンジバ

【禁忌・禁止】

- ・使用目的以外の用途には使用しないこと。
- ・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏性の既往歴のある患者には使用しないこと。

【原材料】

アクリル樹脂、その他

【使用目的、効能又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる材料をいう。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法

本品は液状であり、3Dプリンターを用いて使用目的によって異なる形に造形して使用する。外観及び容量は以下のとおりである。

1) 外観



2) 容量

1.0kg ボトル

3) その他

色	ピンク
密度(硬化前)	1.1～1.3g/cm ³
粘性(硬化前)	1.1～1.5pas
曲げ強度	≥20Mpa
引裂き抵抗	≥15N/mm
硬度ショアD	70

【使用方法】

1. 使用前によく振って使用する
2. DLP方式の3Dプリンターの使用マニュアルに沿って使用する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 高温多湿、直射日光を避けて冷蔵保管すること。
- (2) 使用後は直ちにキャップを閉めること。
- (3) 本品は、幼児・小児・老人の手の届かない場所に保管し、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管すること。

2. 使用期限

- ・製造日から2年。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ピカッシュ

住 所：熊本県菊池郡菊陽町大字原水 2849-1

電話 番号：096-342-1081

製 造 国：ドイツ

2. 原理

3Dプリンターの光触媒と本製品の樹脂が反応し、固まることでデザインごとの装置を造形する。