

歯 03 義歯床材料
 一般医療機器 歯科印象トレー用レジン 70832000
アイ・3Dレジントレー

【禁忌・禁止】

- ・使用目的以外の用途には使用しないこと。
- ・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏性の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法

本品は液状であり、3Dプリンターを用いて使用目的によって異なる形に造形して使用する。外観及び容量は以下のとおりである。

1) 外観



2) 容量

1.0kg ボトル

3) その他

色	緑
密度(硬化前)	1.1~1.2g/cm ³
粘性(硬化前)	1.0~1.3pas
曲げ強度	≥75Mpa
引張弾性率	≥4%
硬度ショアD	80~90

2. 原理

3Dプリンターの光触媒と本製品の樹脂が反応し、固まることでデザインごとの装置を造形する。

【原材料】

アクリル樹脂、その他

【使用目的、効能又は効果】

粉末及び液体の常温重合レジン、ペースト状で常温で硬化させるレジン又は熱可塑性レジンで、個人トレー、ベースプレート等に用いるものをいう。

【使用方法】

1. 使用前によく振って使用する
2. DLP方式の3Dプリンターの使用マニュアルに沿って使用する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 高温多湿、直射日光を避けて冷蔵保管すること。
- (2) 使用後は直ちにキャップを閉めること。
- (3) 本品は、幼児・小児・老人の手の届かない場所に保管し、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管すること。

2. 使用期限

- ・製造日から2年。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ピカッシュ

住 所：熊本県菊池郡菊陽町大字原水 2849-1

電話 番号：096-340-5801

製 造 国：ドイツ