

歯科材料 06 歯科用印象材料
 一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 70891000

アイ・ラボパテ

【禁忌・禁止】

本品または本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、原材料

構成品	性状	成分
ベース材	青色のパテ状	ビニールシリコンオイル、マイクロシリカ、ハイドロゲンシリコンオイル他
カタリスト材	白色のパテ状	ビニールシリコンオイル、マイクロシリカ、レジン他

付属品：計量スプーン

2. 仕様

(室温 25℃、相対湿度 50%の場合)

練和時間：30～45秒

硬化時間：3分

【使用目的、効能又は効果】

複模型の作製に用いるシリコーン印象材。

【使用方法等】

- ①付属の計量スプーンでベース材とカタリスト材を同量計量する。
- ②計量したベース材とカタリスト材を手でよく練和する。



- ④均一な色になるまで30～45秒間練和する。
- ⑤室温では約3分で硬化する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①口腔内で使用しないこと。
- ②開封後はできるだけ速やかに使用すること。

2. 重要な基本的注意

- ①本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を仕様しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ②本品又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び使用期間等】

(保管方法)

- ①本品は、16℃以上25℃以下の常温で乾燥した暗所に保管すること。
- ②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

(有効期間)

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
(製造日から3年以内)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ピカッシュ

住所：熊本県菊池郡菊陽町大字原水 2849-1

電話番号：096-342-1081

製造国：中華民国