


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000
アイ・ミリングバー300

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

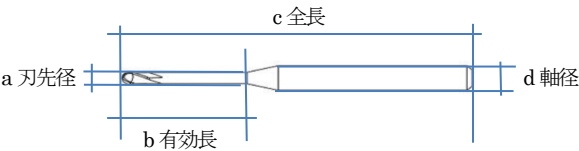

2. 寸法

No.	型番	a (刃先径) φ mm	b (有効長) mm	c (全長) mm	d (軸径) φ mm
1	ZB_23	2	18	50	4
2	ZB_24	1	16	50	4
3	ZB_25	0.6	10	45	4
4	ZB_39	0.3	12	45	4
5	ZB_46	2	18	50	4
6	ZB_47	1	16	50	4
7	ZB_48	0.6	10	45	4
8	ZB_65	0.3	12	45	4
9	ZF_35	1.7	18	50	4
10	ZF_70	1.7	18	50	4
11	ZF_75	0.6	8	45	4
12	ZF_76	0.6	8	45	4
13	MB_58	2	12	44	4
14	MB_59	1.5	10	43	4
15	MB_60	1	8	42	4
16	MB_62	2	12	44	4
17	MB_63	1.5	10	43	4
18	MOB_56	3	20	50	4
19	DG_28	1	10	44.5	4
20	DG_29	0.6	8	41	4
21	DG_30	2.5	13	44.5	4
22	DG_31	1.5	10	44.5	4
23	DG_52	2.5	13	44.5	4
24	DG_53	1.5	10	44.5	4
25	DG_54	1	10	44.5	4
26	DG_55	0.6	8	41	4
27	PB_32	2	18	50	4
28	PB_33	1.5	14	47	4
29	PB_34	1	10	44	4
30	PB_49	2	18	50	4
31	PB_50	1.5	14	47	4

No.	型番	a (刃先径) φ mm	b (有効長) mm	c (全長) mm	d (軸径) φ mm
32	PB_51	1	10	44	4
33	TC_80	1.8	8	45	4
34	TC_81	1.8	8	45	4
35	CAF_S3	3	10	50	4
36	FR_36	3	20	50	4

3.材質

超硬合金、(刃部コーティング：ダイヤモンド、PVD、DLC、電着ダイヤモンド)

4.原理

歯科用 CAD/CAM マシンに装着し、刃先部を回転させながら歯科材料に接触させて切削・研削し、歯科用補綴物を作製する。

【使用目的、効能又は効果】

各種歯科用 CAD/CAM 材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する。

【操作方法又は使用方法等】

1.組み合わせる使用する医療機器

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

(1) 歯科用CAD/CAMマシン

2.使用方法

本ミリングバーは、歯科用CAD/CAMマシンに装着して、歯科用補綴物を製作する。

- (1) 本ミリングバーを使用する前に、刃先部に変形や破損がないことを確認し、切削・研削加工に適した状態であることを確認する。
- (2) 歯科材料が、本ミリングバーでの加工に適した材料であることを確認する。
- (3) 歯科用CAD/CAMマシンに、本ミリングバーを取り付ける。
- (4) コンピュータから加工データを送信し、加工する。

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

アイ・ミリングバー300

【使用上の注意】

- (1) 歯科医療従事者以外は使用しないこと。
- (2) 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。
- (3) 本ミリングバーの加工、改造は行わないこと。
- (4) 本ミリングバーの使用中に異常な振動、異音が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。
- (5) 本ミリングバーは刃物であるため取扱には十分に注意すること。
- (6) 複数の種類の材料を加工する場合は、材料毎にそれぞれ別のミリングバーを用意して使用すること。
- (7) 次の行為は、本ミリングバーの破損の原因となるため行わないこと。
 - ① 刃先部を持つ。
 - ② 刃先部に衝撃を与える。
 - ③ 刃先部を変形させる。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

- (1) 高温・多湿の場所を避け、ケースに入れた状態で保管すること。
- (2) 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管管理すること。

【包装】

包装単位

1 本/包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:株式会社ピカッシュ

住 所:熊本県菊池郡菊陽町大字原水 2849-1

電話 番号:096-342-1081

製 造 元:BOOYOUNG PRECISION CO., LTD.

製 造 国:大韓民国