

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (JMDN コード : 70469000)

アレシ フィンガー&アームトラップシステム

再使用禁止 (フィンガートラップ、アームトラップ)

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

(1) フィンガートラップ、アームトラップは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的外観写真

ハンドポジショナー




ショルダーサスペンションシステム

アームトラップ



タワーシステム

フィンガー
トラップ

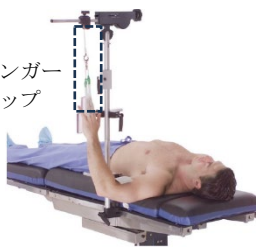

イラコイザー

フィンガー
トラップ



フィンガートラップ



シングル



ダブル

アームトラップ



2. 原理

手術等の際に、各システム及びテーブルを手術台に固定し、フィンガートラップ又はアームトラップを接続して使用することで、患者の肩・腕・手指又はその関節等を張力により固定・保持することができる。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリである。

使用前に取扱説明書をご参照下さい

JPI-HRJ-13B2X10356000067 Rev.1

【使用方法】

1. 使用方法

ハンドポジションナー

- 1) 使用前に、必要に応じて洗浄・消毒・滅菌する。132℃/10分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
- 2) 本システムをクランプに差し込み、高さと角度を調整し、固定する。
- 3) システム側面のスイッチを”MORE”又は”LESS”にセットし、ハンドルを回す。アームを患者側に伸展し、最適な位置で”LOCK”する。
- 4) システムのアームにハンドプレートを取り付ける。
- 5) ハンドプレートを患者の手指に装着し、手首の屈曲角度が最適になるようハンドプレート角度を調節して固定する。
- 6) ハンドプレートを軽く引っ張り、手指がスリップしないことを確認する。

ショルダーサスペンションシステム

- 1) 使用前に、必要に応じて消毒剤で清拭する。
- 2) 本システムの支柱をクランプに差し込む。
- 3) アームトラップに患者の腕を入れ、固定用バンデージをアームトラップの上から手首又は前腕に巻きつけて固定する。
- 4) アームトラップ先端のスナップフック(輪になったロープ部分)を本システムに取り付ける。
- 5) スナップフックを軽く引っ張り、アームトラップが腕から抜けないことを確認する。
- 6) ブームアームの長さ及び高さを最適な位置に調整し、固定する。

タワーシステム

- 1) 使用前に、必要に応じて洗浄・消毒・滅菌する。132℃/10分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
- 2) 本システムを組み立て、クランプに固定する。
- 3) サポートエクステンションアームを手術台外側の方向に向けて固定する。
- 4) ピンを下げて、保持用デバイスの角度を調整する。
- 5) サポートエクステンションアーム上のプーリー(ワイヤーケーブルが格納された歯車様の部品)が、患者ひじの直上に位置するよう固定する。
- 6) ワイヤーケーブルの伸縮を調整する。
- 7) 患者の指にフィンガートラップを装着し、本システムのワイヤーケーブルに取り付ける。
- 8) カウンタートラクションレトラクターを患者の二頭筋に触れる位置に固定する。
- 9) 手を支えるように、リストスタビライザーを最適な位置に調整し固定する。

イラコイザー

- 1) 使用前に必要に応じて洗浄・消毒・滅菌する。132℃/10分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
- 2) 患者の指にフィンガートラップを装着する。
- 3) スナップフックに、患者の指に装着したフィンガートラップのロープ部分を取り付ける。
- 4) フィンガートラップが指の全長をカバーしていることを確認する。

フィンガートラップ

- 1) 患者の指に本品を装着する。
- 2) 患者の指に装着した本品のロープ部分を、スナップフックに取り付ける。
- 3) 本品が指の全長をカバーしていることを確認する。

アームトラップ

- 1) 本品に患者の腕を入れ、固定用バンデージを本品の上から手首又は前腕に巻きつけて固定する。
- 2) 先端のスナップフックをショルダーサスペンショントラップシステムに取り付ける。
- 3) スナップフックを軽く引っ張り、本品が腕から抜けないことを確認する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように装着すること。
- 2) 手術台用クランプのサイドレール又はテーブルのアクセサリレールへの固定、各システムの取付けは確実に行うこと。
- 3) フィンガートラップは患者に適したサイズを選択すること。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

各システム:

5年 [自己認証(当社データによる)]

フィンガートラップ、アームトラップ:

滅菌有効期限 包装に記載

【保守・点検に係る事項】

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒する。
- 2) 使用前に汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ヒルロムジャパン株式会社

製造業者

ヒルロム、インク (米国)

Hill-Rom, Inc.

使用前に取扱説明書をご参照下さい

JPI-HRJ-13B2X10356000067 Rev.1