

歯 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯面研磨材 (コード:70904000)

BA プロフィーパウダー

【禁忌・禁止】

- 呼吸器疾患のある患者には使用しないこと。
- ナトリウム摂取制限が必要な患者には使用しないこと。(スタンダード)
- 本品及び本品に含有される成分に対して、発疹、皮膚炎などのアレルギー症状の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理】*

形状 粉末

原理: 歯面清掃器の空気圧又は水圧を用いて、本品を噴出する。

原材料: 本品は、下記の表に示す種類がある。

種類	スタンダード		ベリオプラス
フレーバー	レモン	ミント	
主な原材料	重炭酸ナトリウム	重炭酸ナトリウム	タガトース
平均粒径	40 μ M	40 μ M	15 μ M
pH	8.1~8.4	8.1~8.4	6~8

【使用目的または効果】

歯面の清掃及び研磨

【使用方法等】*

<使用方法>

- 使用する歯面清掃器の添付文書、取扱説明書を参照する。
- 使用前に本品ボトルを軽く数回振る。
- 本品を歯面清掃器に充填し、歯面の清掃及び研磨を行う。

<使用方法に関する使用上の注意>

- 処置後は速やかに患者に水でうがいをさせること
- 長時間の使用を避け、必要に応じ処置中にも適宜、患者に水でうがいをさせること。
- 処置前にワセリンで患者の唇を塗布し、保護すること。
- 使用時は、バキュームを併用すること。
- 使用後に本品が歯面清掃器に残った場合は、本品を容器に戻さずに廃棄すること。
- 吸湿及び汚染を防ぐため、本品使用後はすぐに容器のふたを締めること。
- 容器の入れ替えをしないこと。
- 開封後に本品が湿気を帯びている場合は使用しないこと。歯面清掃器の

故障の原因になる。

【使用上の注意】*

<重要な基本的注意>

- 本品または本品に含まれる成分に対する発疹、皮膚炎等のアレルギー症状の既往歴のある患者には本品を使用しないこと。また、本品の使用によりアレルギー症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- 術者は保護メガネ、グローブ、防塵マスク等の適切な保護具を着用すること。
- 患者にはエプロン、タオル、ドレープ等で皮膚への飛散を防止し、保護メガネ等により目の保護を行うこと。
- 皮膚へ付着、飛散しないよう注意すること。本品使用時は適切な保護具を使用し、肌の露出のない衣類を着用すること。皮膚に付着したときは直ちに石けんで洗い流すこと。
- 目に入らないよう注意すること。本品使用時は保護メガネ等の保護具を使用すること。万が一目に入ったときは、十分な量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。
- 飲み込まないように注意すること。誤って飲み込んだ場合は、口腔内を洗浄し、大量の水を飲ませること。必要に応じ、専門医の診察を受けさせること。
- 歯科従事者以外が触れないよう、適切に使用及び保管すること。

【保管方法及び有効期限等】

<保管条件>

高温多湿、直射日光、熱源、水濡れを避けて保管すること。

<使用期限>

容器に記載の使用期限までに使用すること。

使用期限は自己認証(当社データ)による。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者:株式会社B. A. International

電話:072-656-2611

製造業者:PRISMAN GmbH(国名:ドイツ)