

再使用禁止

【BTI デンタル技工用器具】

【禁忌・禁止】

以下の品番以外は再使用禁止。

SBLATZ, SBLETZ, SBLI31, SBLIA0, SBLIA1, SBLIE0, SBLIE1, SBLIESMIUPU, SBLIU0, SBLIU1, SBLMIEUA, SBLMIPA, BLMIPEU, SBLMIUPA, SBLMIUPE, SBLMIUPU, SBLTZMIUPA, SBLTZMIUPU, SBLTZMIUPUL, SBLUTZ, SBLTZMIPA, SBLTZMIPU

【形状、構造及び原理等】

1. キャスタブル・アバットメント CASTABLE ABUTMENTS

品番名	形状	品番名	形状
CIESMIPA		CIESMIUPU	
CIESMIPAEX		CIESMIUPUA	
CIESMIPU		CIESMIUPUEX	
CIESMIPUA		CIESMIUPUL	
CIESMIPUEX		CPESPA	
CIESMIUPA		CPESPE	
CIESMIUPAEX		CPESPU	
CIESMIUPE		PUCMIUPA	
CIESMIUPEEX		PUCMIUPU	

2. ラボラトリーコンポーネンツ DENTAL LABORATORY COMPONENTS

品番名	形状	品番名	形状
INRDII3		SBLATZ	
INRDIIA		SBLETZ	
INRDIIE		SBLI31	
INRDIIU		SBLIA0	
INRLI3		SBLIA1	
INRLI325		SBLIE0	
INRLIA		SBLIE1	
INRLIE		SBLIESMIUPU	
INRLIU		SBLIU0	
		SBLIU1	
INTTLH		SBLMIEUA	
RDIMIA		SBLMIPA	
RDIMIEU		SBLMIPEU	
RDIMIEUA		SBLMIUPA	
RDIMIUPA		SBLMIUPE	
RDIMIUPU		SBLMIUPU	
		SBLTZMIPA	

品番名	形状	品番名	形状
RDIMIUPU		SBLTZMIPU	
RLMIA		SBLTZMIUPA	
RLMIEU		SBLTZMIUPU	
RLMIEUA		SBLTZMIUPU L	
RLMIUPA		SBLUTZ	
RLMIUPE		INTEIU	
RLMIUPU		INTEIU16	
TEMIR		INTEPESPE	
TEMIR12			
TEMIR20			

3. スキャンデバイス SCAN DEVICES

品番名	形状	品番名	形状
SBI3		SBIIE1	
SBIA		SBIU0	
SBIE		SBIU1	
SBIU		SBIMIEUA	
SBMIPA		SBMIPA	
SBMIPU		SBIMIPEU	
SBMIPUA		SBIMIUPA	
SBMIUPA		SBIMIUPE	
SBMIUPE		SBIMIUPU	
SBMIUPU		SBIMIUPUA	
SBIATZ		SBITZMIPA	
SBIETZ		SBITZMIPU	
SBLI31		SBITZMIUPA	
SBLIA0		SBITZMIUPU	
SBLIA1			
SBIIE0			

4. インプレッションコーピング DENTAL IMPRESSION COPING

品番名	形状
SID	

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

1. キャスタブル・アバットメント

部分的または全体的に無歯顎の患者の歯を、それぞれ部分的または全体的に修復するため、固定式または取り外し式の補綴物の製造に使用される。

2. ラボラトリーコンポーネンツ

技工所等で使用される。

インプレッションコーピングを施したトレーを患者の腔内から取り出し、インプラントアナログをネジで固定する際に使用される。

3. スキャンデバイス

スキャン内のインプラントのレプリカにおいて、シリンダーの位置を正確に参照するために使用される。

4. インプレッションコーピング

インプラントや経皮・アバットメントから直接印象を取るために使用される。

【使用方法等】

1. キャスタブル・アバットメント

インターナル、エクスターナルワイド/ユニバーサル/ストレッチブラットフォームのジルコニア製審美用ボール（PATZX、INPATZX、INPETZX、PUTZX、INPUTZX）および上皮間ユニット（PTZMIUPU、PTZMIUPA）のための回転防止システムを備えたケーシング（拡張型および角型を含む）として使用する。

2. ラボラトリーコンポーネンツ

インプラントまたは経皮的ブラットフォームアナログとして使用する。スキャンデバイスは、インプラント体に連結し、スキャンによって形状を読み取って相対的な位置情報を取得する。

3. スキャンデバイス

インプラント体に連結し、スキャンによって形状を読み取って相対的な位置情報を取得する。

4. インプレッションコーピング

コーピング本体は接続部の形状をしており、ネジは手動または大型の六角レンチで締め付けて使用する。

【使用上の注意】

1. 素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
2. 家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には、歯科用防腐洗浄剤を使用すること。
3. 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
4. 洗浄、消毒、滅菌上の注意。
 - ・グルタラル製剤、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベントニウム、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。
 - ・使用後は、防腐洗浄液、精製水に用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
 - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥させること。
 - ・アルコールを使用した高圧滅菌、乾燥滅菌は、劣化の原因になるため使用しないこと。
5. 腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。
6. 保管上の注意「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
7. 手技に熟練した医療スタッフが行ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・清潔で乾燥した場所に常温で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

2. 有効期間

- ・歯科の従事者により本品に不良箇所が認識できたとき及び不良が疑われるときは使用を止めること。
- ・歯科の従事者により本品の機能の低下が認識できたときは使用を止めること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：BTI ジャパン株式会社

住所：東京都千代田区神田司町2丁目19番地

電話番号：03-5577-4580

製造業者

名称：ビーティーアイ バイオテクノロジー インस्टイチュート（国名：スペイン）

B.T.I. Biotechnology Institute, S.L.