

## ビーアイシー打診器


## 【禁忌・禁止】

- 本製品を改造、分解しないでください。
- 製品が破損するおそれがあるので、折り曲げないでください。

## 【形状・構造及び原理等】

## ＜形状、構造＞

弾力性のあるPP及びEPDMのヘッド、プラスチック製のハンドルから構成される。重さには75gと150gの2種類がある。以下に代表的な形状図を示す。

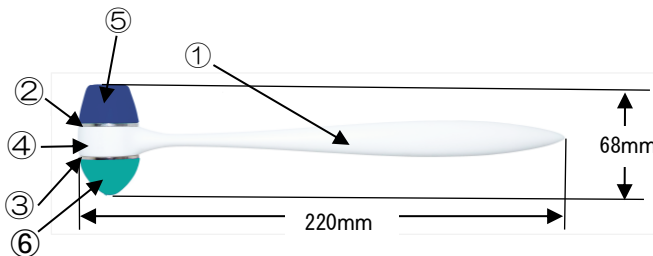

番号	名称
①	ハンドル
②	ハンマー重量部
③	ハンマー重量部
④	圧縮ばね
⑤	ハンマーヘッド
⑥	ハンマーヘッド

## ＜原理＞

ヘッド部やシャフトにより適度に衝撃を吸収しながら、検査部位へ力を伝達する。

## 【使用目的又は効果】

ハンドル、軸及びヘッドからなる金属製及びプラスチック製の器具をいう。反射を検査するため身体に力を伝達するために用いる。ハンドルは手のひらに適合するように設計され、丸く軸に向かって先細りになり、この軸の先端にヘッドがある。衝撃を吸収するために、ヘッドの両端はプラスチック製のハンマーヘッドである。本品は神経学的検査に用いる。

## 【使用方法等】

## 1. 使用前

- 製品に破損がないかを確認し、破損又は破損のおそれがある場合は使用しないこと。
- 必要に応じて洗浄又は清拭する。

## 2. 使用方法

打診部を検査部位にあてがい、ハンドルを手で操作してたたき、患者の反応を観察する。

## 【保守・点検に関する事項】

## 使用者による保守点検事項：

- 毎回使用前に本品全体の汚れた部分を拭き取ること。
- 使用後は、中性洗剤と清潔なコットン製の布で清拭する。アルコール系消毒剤の使用は避ける。
- 本品を過度の熱、冷気、溶剤、湿気及び油/(皮膚から分泌される)脂質に長時間さらさない

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ビーアイシーグループ株式会社  
ビーアイシーメディカル事業部  
東京都千代田区丸の内3-4-1  
新国際ビル

TEL:03-6269-9580

製造業者：キメテック社（ドイツ）  
Kimetec GmbH